


Brukarinformation


För Svea gåbord



Bromsjustering

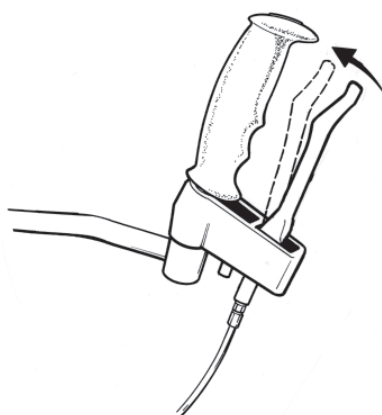

Färdbroms:
Dra bromshandtagen bakåt.

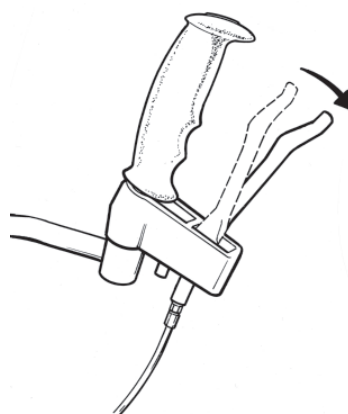

Parkeringsbroms:
Tryck bromshandtagen framåt.

Observera att Svea gåbord inte går att fälla ihop.

Skötselråd

- Rengör gåbordet med vanligt rengöringsmedel, utan lösningsmedel.
- För att ditt gåbord ska fungera optimalt lämna in den på årlig översyn.
- Kontrollera att skruvar och reglage är ordentligt åtdragna
- Om gåbordet inte fungerar - kontakta din ordinator.
Egna ingrepp är inte tillåtna.



Observera att gåbordet endast får användas som gånghjälpmedel.

Tillbehör till Svea gåbord

Enhandsbroms
Stödhjul

Produkten är CE-märkt enligt Medicintekniska direktivet.