




# Lyftbåge

Art. nr: 896


## Om produkten

 **Viktigt!** Läs noga igenom anvisningen!

- Får endast användas som förflyttningshjälpmedel vid säng.
- Produkten är CE-märkt enligt Medicintekniska direktivet.

### Maxbelastning beroende på hylsplacering

Hylsan kan förskjutas 190 mm i vågrätt läge.

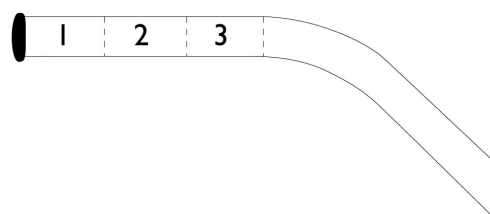

Art.nr.	Benämning	Maxlast läge 1	Maxlast läge 2	Maxlast läge 3
896	Lyftbåge inkl. hylsa sänglåsning	60	65	70
896-1	Lyftbåge exkl. hylsa sänglåsning	40	45	50

### Rengöring

Vid rengöring av produkten – tvätta av lyftbågen med handvarmt vatten och ett mildt rengöringsmedel.

Använd ej rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller har ett lägre PH-värde än 5,0.

För att undvika rostangrepp i benen – ta loss dem från lyftbågsstativet och låt dem torka efter rengöring.

### Övrigt

Om önskan finns, att använda andra likvärdiga på marknaden förekommande reservdelar samt tillbehör, kontakta först Human Care.

# Monteringsanvisning

## 1. Golvstativet

- Drag ut de blanka plattovala rören i bredd med sängsidorna. **OBS!** Dras ut till halva stoppmarkeringen (röda punkten).
- Lås fast rattarna.
- Vid ojämnt underlag vrid gummifötterna på undersidan till dess stabilitet uppnås.

## 2. Mellanröret

Sätt i röret i mellanröret. Genom att vrida det åt sidan märker Du att den är rätt isatt när det stoppar vid 30° i utsvängt läge.

## 3. Fixeringsdetalj

(Hylsa sänglåsning art.nr. 1116000)

För upp hylsan med plattjärnet mot sängens undersida och skruva fast. Ratten kan flyttas till motsatta sidan om utrymmet så fordrar.

**OBS!** Om höj- och sänkbar säng används kan ej sänglåsningen användas. Lyftbågen skall dessutom stå fritt från sängen så att en eventuell höjning eller sänkning av sängen inte påverkar eller kan påverka lyftbågen i något läge.

## 4. Hylsa med handtag

Hylsan kan förskjutas 190 mm i vågrätt läge. Handtaget är reglerbart i höjd genom ändring av kedjelängden.

