



## Brukarinformation

### Utfällning

1. Dra i låsbygeln under sitsen och rollatorn fälls ut automatiskt och låses.

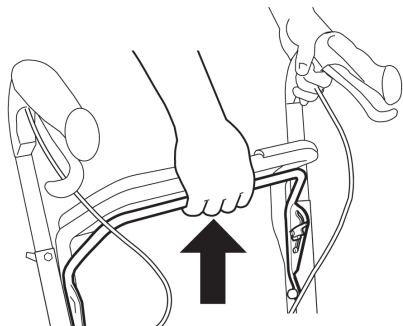


Viktigt! Kontrollera att den röda låsspärren faller ner av sin egen vikt.

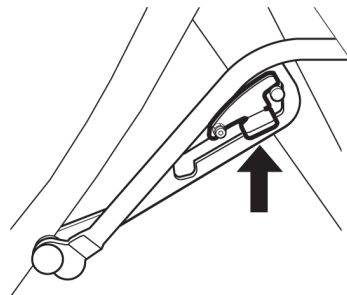

### Hopfällning

1. Lyft upp den röda låsspärren.
2. Dra låsbygeln uppåt. Rollatorn fälls ihop automatiskt.
3. För ihop stativet tills rollatorn låser i hopfällt läge.

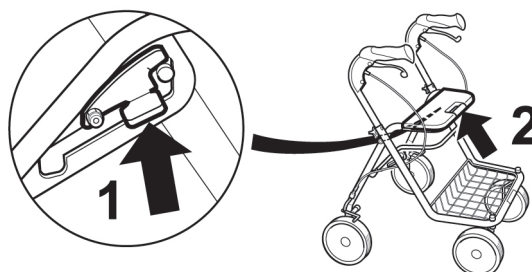


### Justering av körhandtag

Lossa vingvreden och justera körhandtagen till handledshöjd. Lås vingvreden.

Vinkling i sidled av handtagen:  $\pm 0^\circ$ .



Viktigt! Handtagen får inte höjas över markeringen "MAX" på handtagsrörens sidor. Körhandtagen ska vara riktade framåt. Handtagsrörets siffror ska vara i linje med slits på rörets sidor.

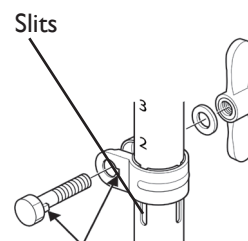



**Varning!** Handtagen får ej vinklas utåt eftersom rollatorns tipprisk då ökar.

Vid montering av vingvreden är det viktigt att klacken på skruven hamnar i spåret i skruvhålet.

### Parkeringsbroms


Tryck bromshandtaget nedåt för parkeringsläge.

**Varning!** Parkeringsbromsa innan Du sätter dig.

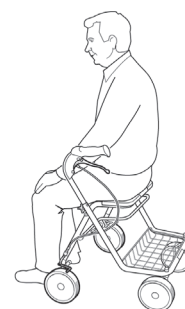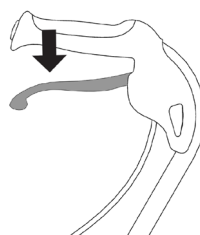

### Färdbroms

Dra bromshandtaget uppåt för färdbroms.

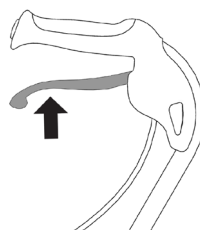


OBS! Bromsen består av en bromsspak för varje hjul, där höger bromsspak påverkar höger hjul, och vänster bromsspak påverkar vänster hjul.

Bromshandtaget drar i en wire som löper i ett hölje. Wiren drar i en bromsbygel som trycker på hjulet. Vid enhandsbroms påverkar en bromsspak båda hjulen.

### Bromsjustering

Justera bromsen genom att lossa på kontramuttern och därefter skruva upp eller ner justermuttern. Efter justering lås kontramuttern mot justermuttern.

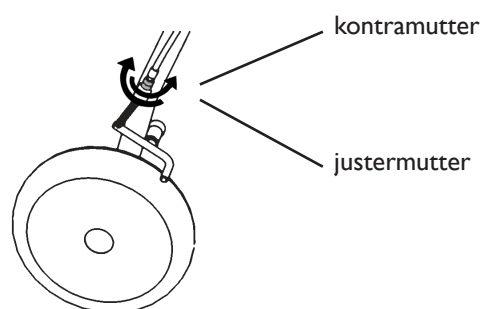

OBS! Kontinuerlig bromsning leder till onormalt slitage på hjul och broms.

### Rengöring och service

Viktigt!

Vid byte av delar på rollatorn ska endast originaldelar användas för att CE-märkningen ska gälla.

Viktigt!

Utför regelbunden översyn av utrustningen för att den ska fungera tryggt och säkert för brukaren.

Viktigt!

Egna ingrepp/ändringar på rollatorn är inte tillåtet.

Översyn bör genomföras regelbundet enligt rekonditioneringsanvisningar, art. nr. 99210-SWE.

Rollatorn rengörs med rengöringsmedel utan lösningsmedel. Efter rengöring bör alla leder och trånga utrymmen blåsas torra och sprejas med tunnflytande olja.

För mer information om service, rekonditionering, reservdelar och tillbehör, se Human Care Swedens hemsida: [www.humancare.se](http://www.humancare.se) eller kontakta oss via adress, telefonnummer eller e-mailadress enligt sista sidan.